



Document d'instruction

DT-624 Manipulation Hemabox Hemabox

1. Manipuler et régler Hemabox à sa vue.....2
2. Illustration.....3

16974	Nom du document	Numéro de version	Date d'application	Page
	Manipulation Hemabox	3	05/02/2024	1/3

Ce document a pour objectif d'expliquer comment ajuster Hemabox à sa vue sans endommager le dispositif pour un réglage adapté à l'utilisateur.

1. Manipuler et régler Hemabox à sa vue

Pour régler Hemabox à votre vue il est nécessaire de débloquent le bras de liaison (4) qui se trouve entre la rotule de potence (5) et la rotule (3) du support vesa (1) à l'aide de la vis de blocage (2). Repères sur la Photo1.

Pour qu'Hemabox ne parte pas dans un mouvement de rotation rapide et brutal vers le bas, veuillez à maintenir Hemabox d'une main avant de libérer les mâchoires de blocage du bras de liaison comme sur la photo2.


La libération des mâchoires de blocage du bras de liaison se fait en dévissant la vis de blocage (sens inverse des aiguilles d'une montre).

Régalez Hemabox à votre vue, et vissez la vis de blocage pour maintenir Hemabox dans la position souhaitée (photo3).

Le fait de ne pas respecter cette procédure peut nuire à l'intégrité du boîtier en exerçant des contraintes physiques pouvant conduire à l'apparition de fissures sur les parties en plastique de celui-ci.

Le fait de ne pas respecter cette procédure peut générer un effet de levier inapproprié sur les points d'ancrage du support de potence qui peut aller jusqu'à la rupture de ceux-ci.

Photo 1

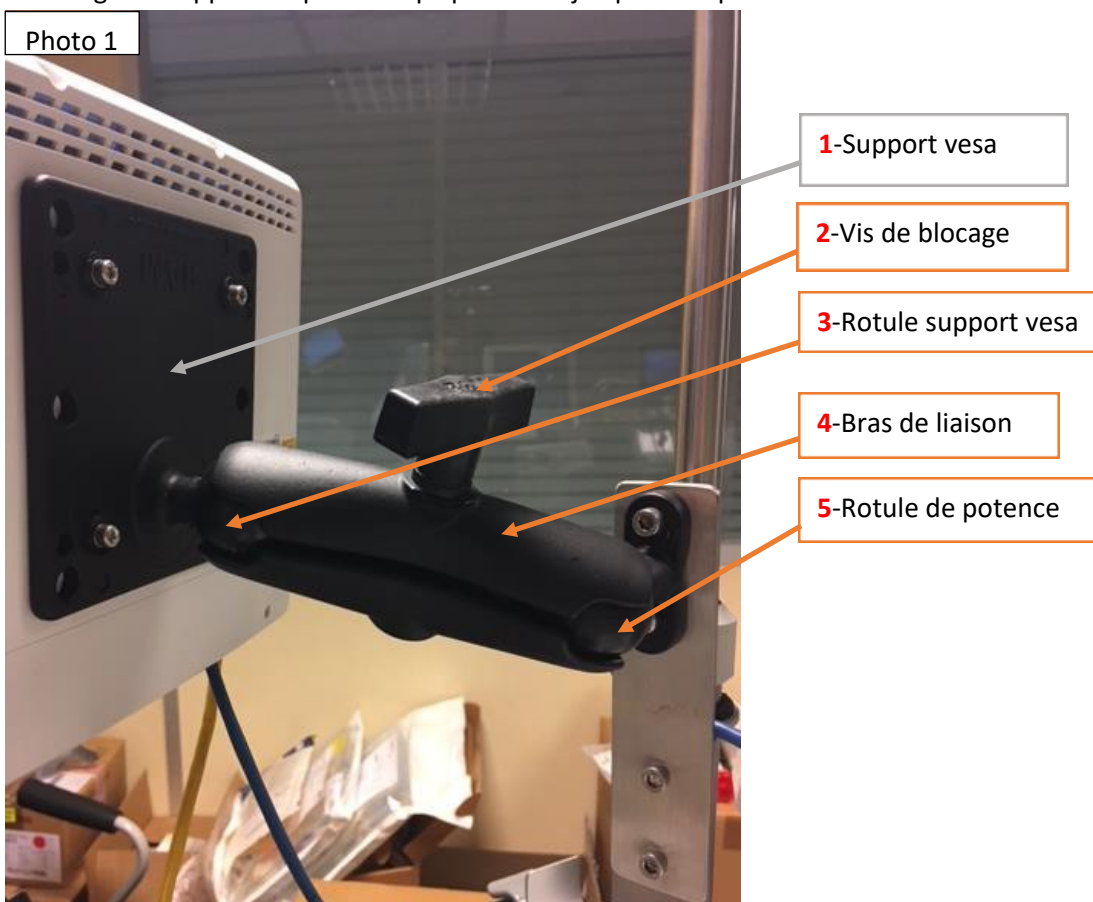

2. Illustration

Ci-dessous des photos pour illustrer la méthode.

