



Document technique

DT-20482 Notice de paramétrage de DBB-EXA



Ce document présente le paramétrage à effectuer pour le fonctionnement de Hemabox avec le générateur NIKKISO DBB-EXA.


	Nom du document	Numéro de version	Date d'application	Page
20482	DT-20482 20482 [V2] Notice de paramétrage de DBB-EXA	2	30/10/2025	1/8

1.	Paramétrage du générateur.....	3
1.1.	Saisir le mot de passe du technicien et valider.....	3
1.2.	Aller dans le Mode technique.....	4
1.3.	Sélectionner Network.....	4
1.4.	Paramétrer l'adresse IP du générateur :.....	5
1.5.	Saisir le numéro de série du générateur.....	6
1.6.	Network module doit être activé.....	7
1.7.	Sortir du mode technique.....	7
1.8.	Redémarrer le générateur.....	8


	Nom du document	Numéro de version	Date d'application	Page
20482	DT-20482 20482 [V2] Notice de paramétrage de DBB-EXA	2	30/10/2025	2/8

1. Paramétrage du générateur

A faire réaliser par le service technique Hemotech ou par le service technique biomédical de l'établissement ou sous contrôle du service technique biomédical de l'établissement.
Accéder au mode technique.

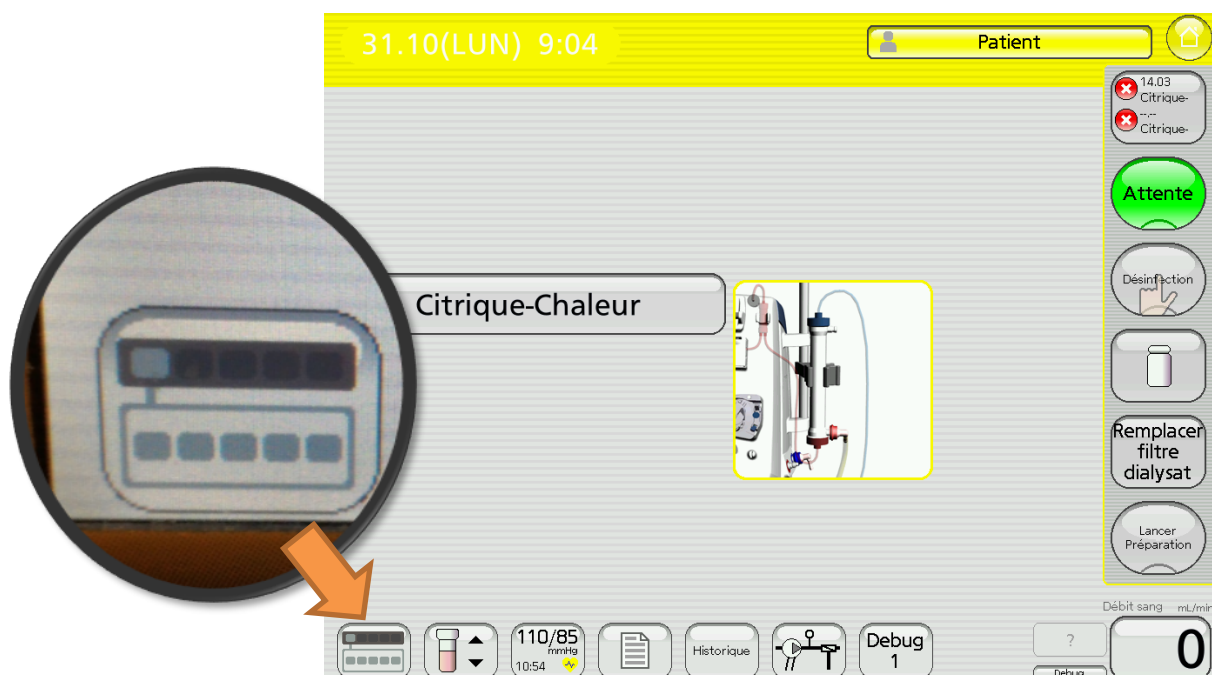


1.1. Saisir le mot de passe du technicien et valider

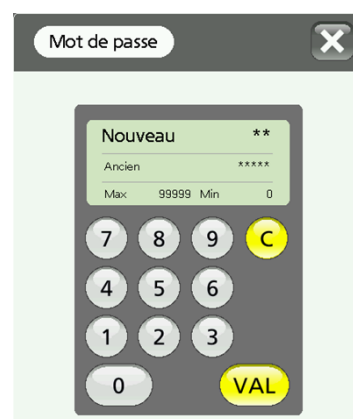


	Nom du document	Numéro de version	Date d'application	Page
20482	DT-20482 20482 [V2] Notice de paramétrage de DBB-EXA	2	30/10/2025	3/8

1.2. Aller dans le Mode technique

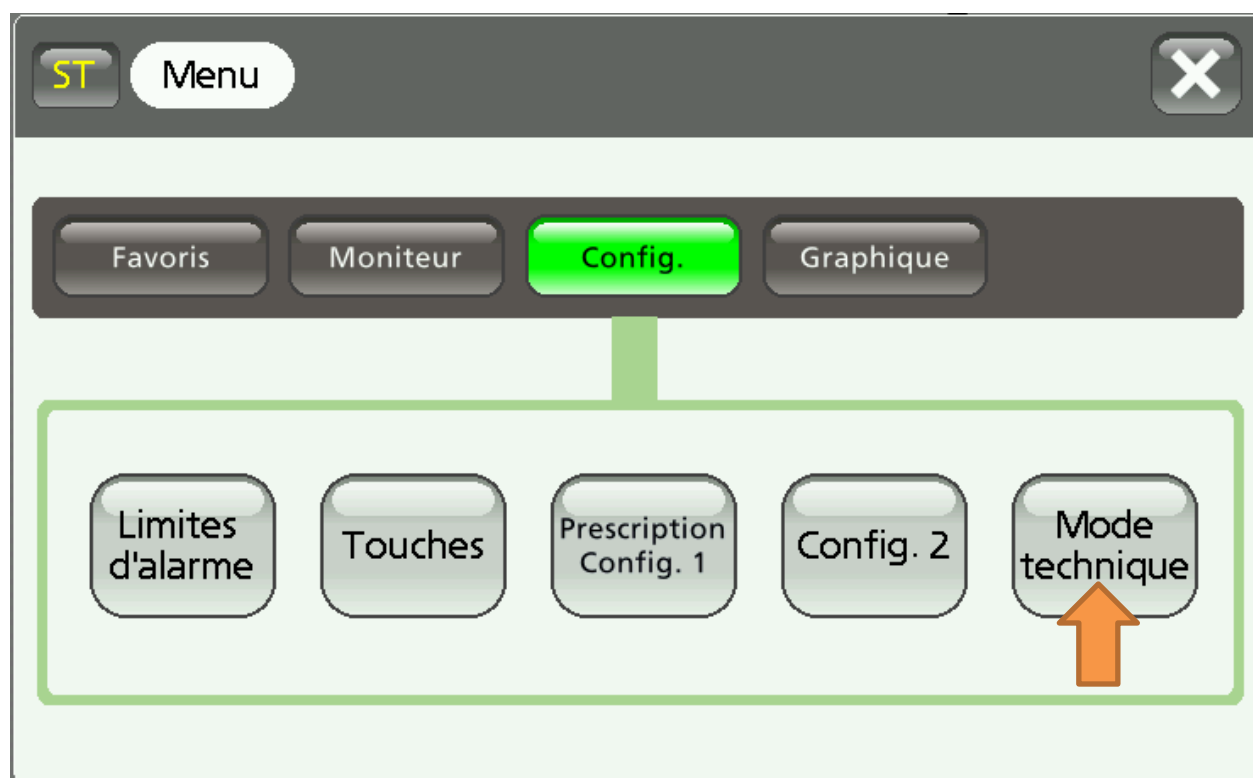


1.3. Sélectionner Network

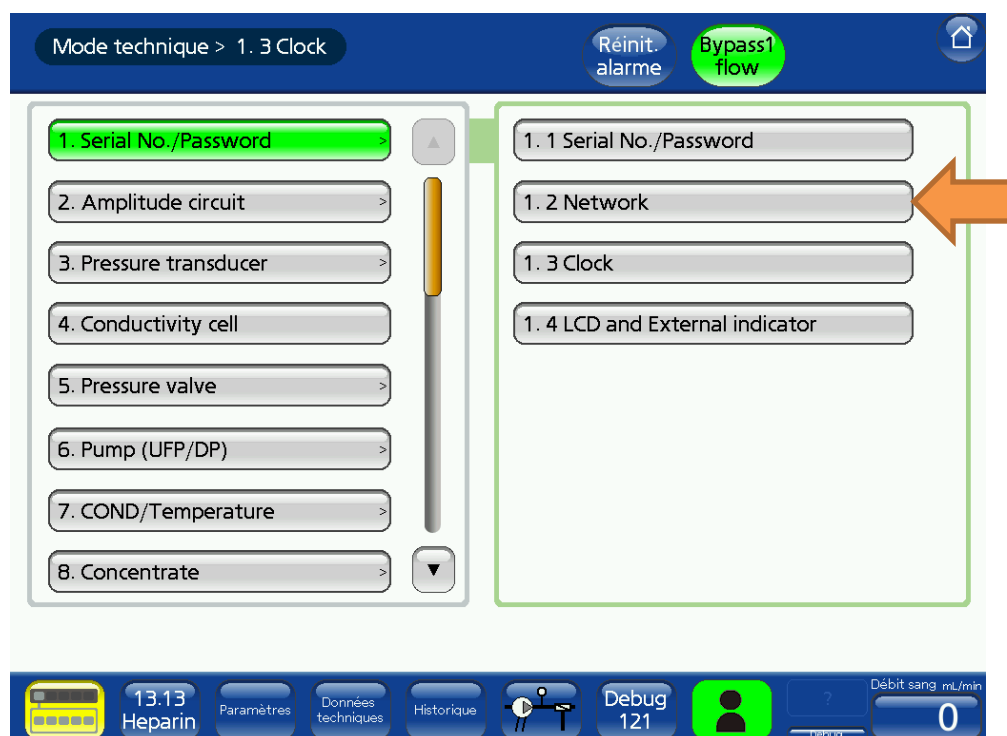

1.4. Paramétrer l'adresse IP du générateur :


Tous les générateurs auront le même paramétrage réseau.

Si possible, renseigner les adresses IP comme ci-dessous. Dans le cas contraire, communiquer les adresses utilisées au technicien Hemabox en charge de votre installation :

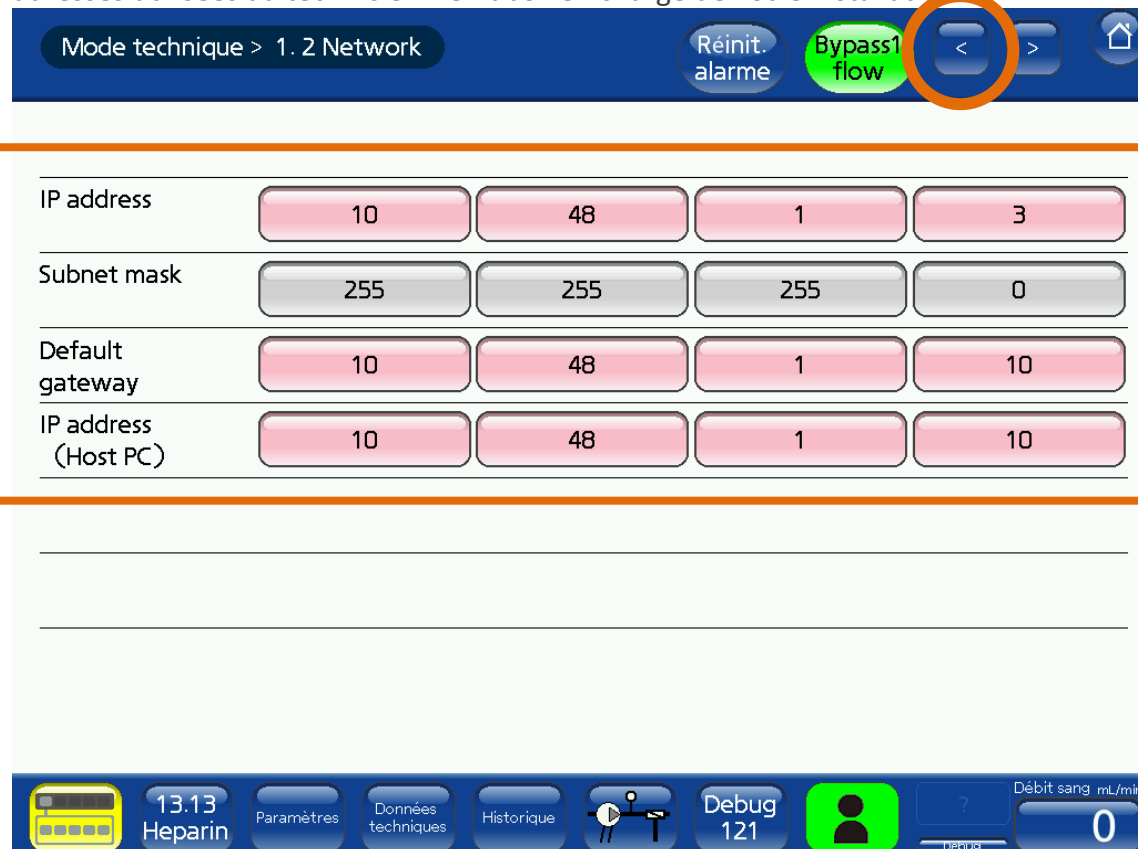


IP address	10	48	1	3
Subnet mask	255	255	255	0
Default gateway	10	48	1	10
IP address (Host PC)	10	48	1	10

A partir de la version du logiciel générateur V3.0, une fonction « Encrypt » a été ajoutée. Il est nécessaire de vérifier qu'elle soit **désactivée** :

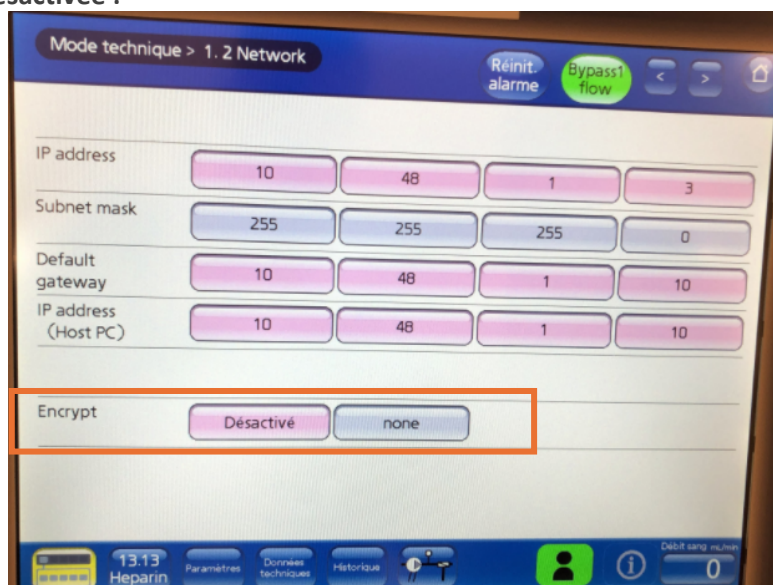


Encrypt	Désactivé	none
---------	-----------	------

Ensuite, appuyer sur la flèche retour  pour afficher la page de saisie du numéro de série.

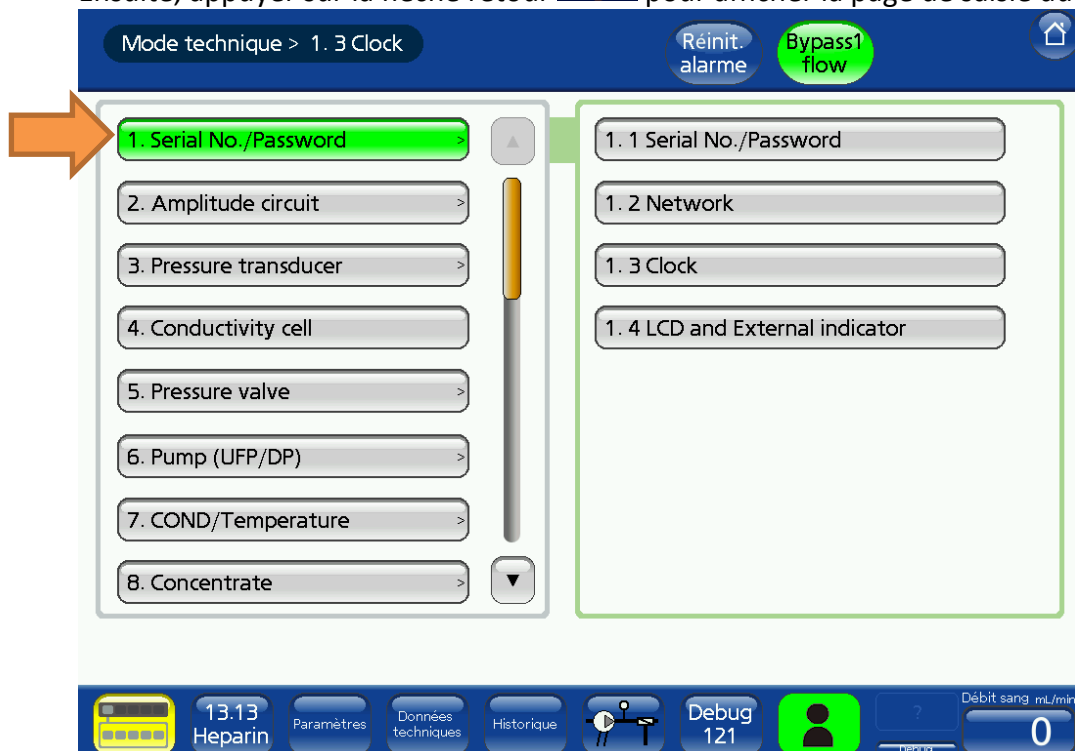

1.5. Saisir le numéro de série du générateur


Saisir le « Serial number » qui devra correspondre au numéro de série du générateur, **sans la lettre « J »**. Il faudra créer le nom d'inventaire du générateur dans Hemodialyse, table « Matériel médicaux », et renseigner le même numéro dans le champ « numéro de série ».

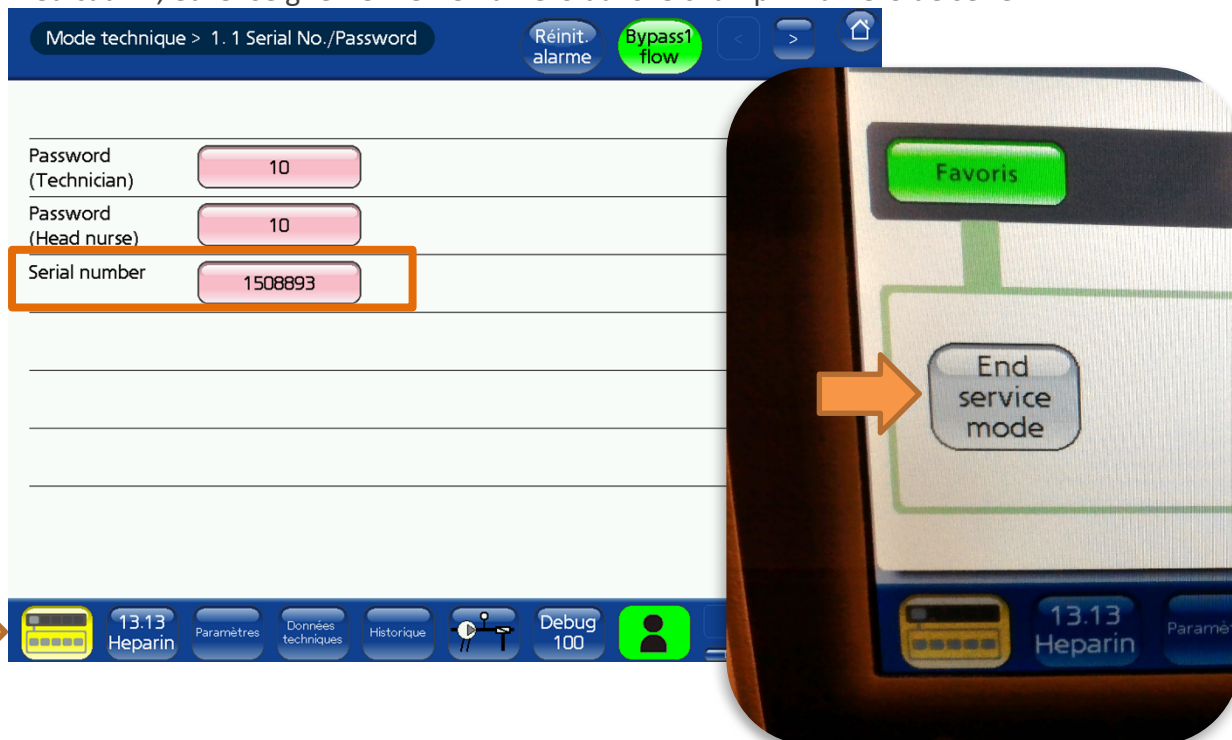

Sortir de cette page et dans le menu, aller à la fin : 99.4


	Nom du document	Numéro de version	Date d'application	Page
20482	DT-20482 20482 [V2] Notice de paramétrage de DBB-EXA	2	30/10/2025	6/8

1.6. Network module doit être activé.

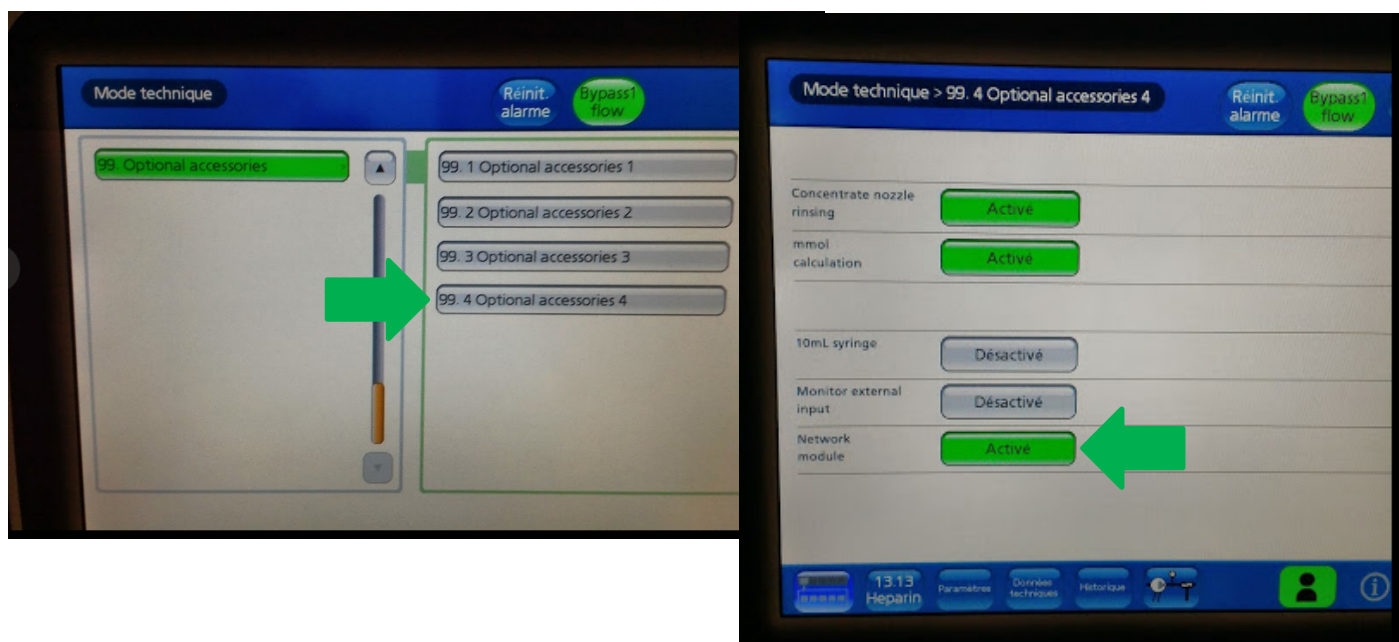


1.7. Sortir du mode technique

Pour sortir du mode technique, cliquer de nouveau sur l'icône en bas à gauche puis appuyer sur « End service mode ».

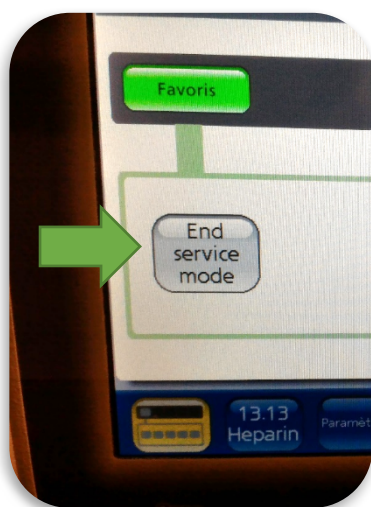

Pour se déconnecter du mode admin, il faut appuyer sur la maison en haut à droite :

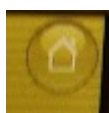

	Nom du document	Numéro de version	Date d'application	Page
20482	DT-20482 20482 [V2] Notice de paramétrage de DBB-EXA	2	30/10/2025	7/8

1.8. Redémarrer le générateur

Pour que le paramétrage soit pris en compte, un redémarrage du générateur est nécessaire.

Pour sorti du mode technique, cliquer de nouveau sur la touche  puis appuyer sur « End service mode ».

Fin du paramétrage.

	Nom du document	Numéro de version	Date d'application	Page
20482	DT-20482 20482 [V2] Notice de paramétrage de DBB-EXA	2	30/10/2025	8/8