

Filtrer la liste des établissements sur l'Hemabox

Sommaire

Description	2
1. Repérer les numéros d'identification des centres de dialyse.	2
2. Hemabox	3
2.1. Paramétrage sur Hemabox.....	3
2.2. Démonstration :	5

Description

Par défaut, l'Hemabox affichera la totalité des localisations d'une base Hemadialyse à la sélection du patient. Ce guide vous permet de filtrer la liste des localisations des Hemabox sur un ou plusieurs sites spécifique. La première étape consistera à connaître le numéro d'identification de chaque centre de dialyse.


1. Repérer les numéros d'identification des centres de dialyse.

Sur Hemadialyse :

1. Accédez au dossier :

Gestion des bibliothèques de base -> établissements.

Remarque : Vos droits d'accès sont peut-être restreint, contactez l'administrateur de la base Hemadialyse

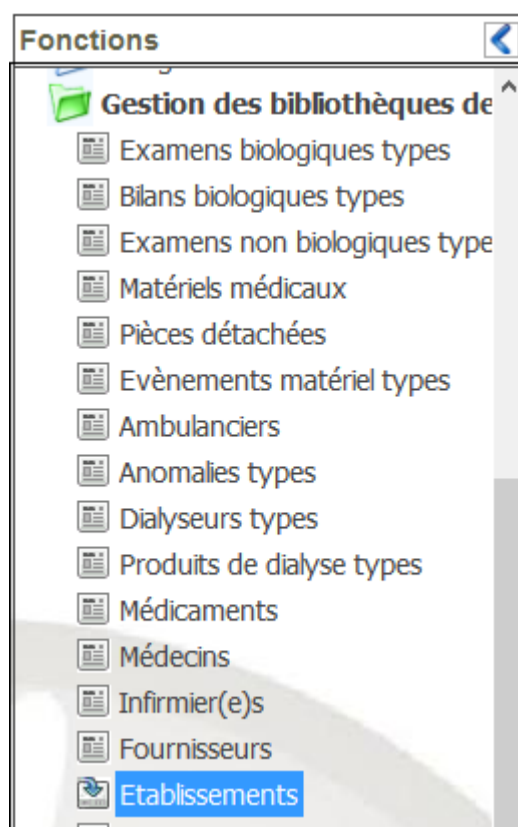


2. Double cliquez sur l'établissement

Etablissements

BIENETRE
CALME
Centre d'Autodialyse
Centre de Sainte Victoire
Centre de Test
CENTRE HD AGEN
CH bethune

3. Le numéro d'identification du centre de dialyse se trouve en haut à droite de la fiche établissement :

ATTENTION : Ne pas confondre avec le numéro du dessous.

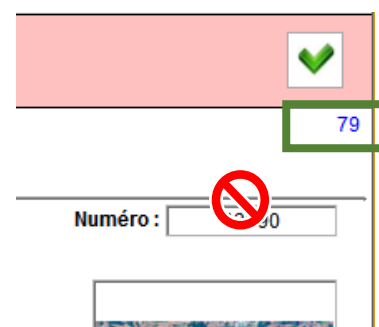

2. Hemabox

Le paramétrage doit être répéter à l'identique sur chaque Hemabox de la localisation.


2.1. Paramétrage sur Hemabox

Au démarrage de l'Hemabox, sélectionner paramétrage

Paramétrage



Renseigner le code à 4 chiffres qui vous a été communiqué puis appuyer sur OK

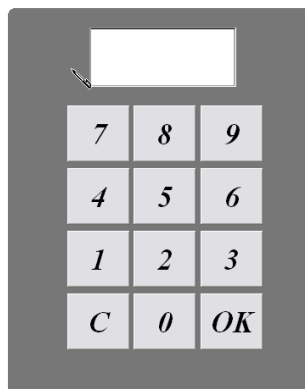

Paramétrage

	
 HEMADIALYSE 192.168.1.169 HMD/LinkSrv Ip adress	
 /120	
 192.168.1.169:8011 Vidalsoap Ip adress	
 HEMABOX 192.168.1.169:8083 NboxSoap Ip adress	
	 5;14

Sélectionner la cellule localisation (encadré en vert)



Renseigner le ou les numéros d'identification des centres de dialyse souhaitée (vu dans l'étape précédente). Si on laisse le champ vide, la totalité des localisations sera présente.

					<-
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
.	:	/	\	OK	
@	=	-	;		

Si vous désirez en mettre plusieurs, vous devez séparer les valeurs par des points-virgules.

Exemple : 5;114

Valider avec OK

Redémarrage nécessaire de l'Hemabox pour prise en compte.

2.2. Démonstration :

A la sélection du patient, nous trouvons par défaut, la liste complète des localisations :

Choisissez votre localisation

BIENETRE
Centre d'Autodialyse
Centre de Test
CH NICE
Clinique du bois Bleu (nuit) Médecine interne
clinique du bois bleu - médecine interne
consultation med interne WEB
consultation médecine interne
DMP
ETABLISSEMENT_C7DBA4B9BE0FDB458287
ETABLISSEMENT_D3CDA189A7B3E443B9C1

Après avoir fait le changement au niveau du paramétrage, je n'ai plus que les 5 localisations à la sélection du patient.

Choisissez votre localisation

BIENETRE
Centre d'Autodialyse
Centre de Test
CH NICE
Clinique du bois Bleu (nuit) Médecine interne